


Esteem synergy[®]



ConvaTec

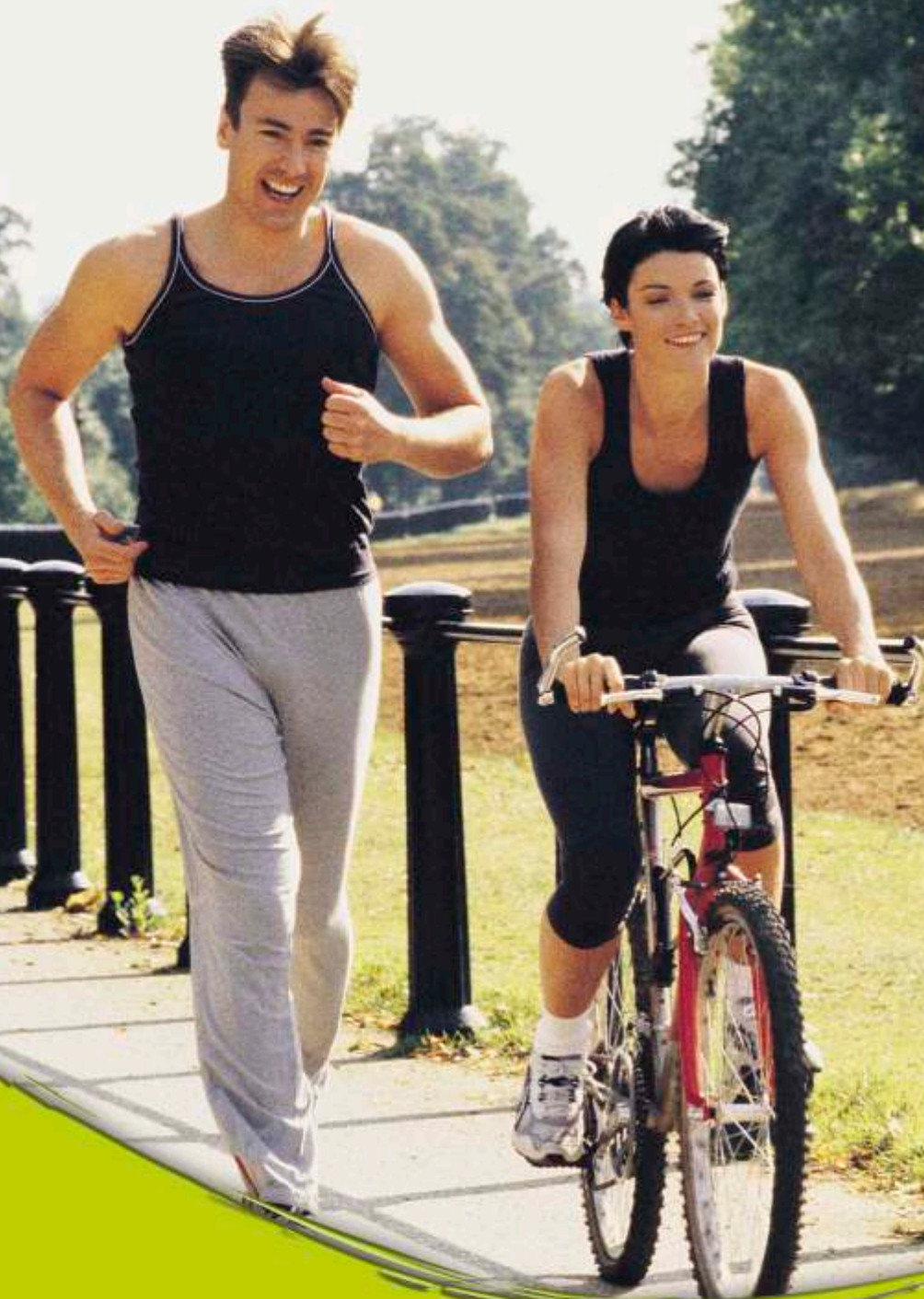

Sustav od značaja...

podiže standarde u njezi stome - fleksibilan, siguran i prilagodljiv sustav

PRVI IZBOR za aktivne pacijente
štiti peristomalnu kožu

Jedinstveni 2-u-1 sustav

Esteem Synergy™ spoj bez prstena

zdržuje najbolje osobine jednodijelnog i dvodijelnog sustava



Spoj bez prstena


- zaštitni papir podložne pločice (strana prema tijelu)



- područje lijepljenja (strana prema vrećici)



- ljepljivi prsten na vrećici

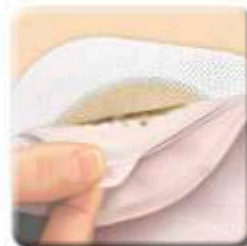

Prednosti

- Prozirna folija na koju se lijepi vrećica ujedno je i vizualna kontrola sigurnosti spoja
- Jednostavna i bezbolna primjena
- Diskretnost - nezamjetan i nizak profil, čak i kod uske odjeće
- Udobnost - vrećica se jednostavno može premjestiti i prilagoditi tijelu
- Brza izmjena vrećice - za potrebe vježbanja, noćenja...
- Rjeđa izmjena podložnih pločica štiti kožu i štedi vrijeme

Učinkovito dvodijelno rješenje

Esteem Synergy™ izgrađuje povjerenje pacijenata



Neosjetljiv pritisak

- Spajanje podložne pločice s vrećicom, ali bez prstenastih spojnica - pritisak je *u pola manji* od pritiska kojeg je potrebno primijeniti kod ostalih testiranih sustava.
- Vršci prstiju smještaju se ispod „područja lijepljenja“, kako bi se smanjio pritisak pri uklanjanju.
- Svojestvo nježnog uklanjanja vrećice s „područja lijepljenja“, kako bi se promotrla stoma (ili ispuštili plinovi).

Pouzdan spoj

- Inovativno pjenasto ljepilo (Adhesive Coupling Technology™) spaja vrećicu s prozirnim „područjem lijepljenja“ podložne pločice.
- Sigurnost dokazana u laboratoriju - unatoč opterećenju 3.5 puta većem od uobičajenog kapaciteta standardne vrećice, spoj vrećice s podložnom pločicom i nadalje je ostao netaknut.

Napredna tehnologija
spajanja lijepljenjem - ACT

Esteem Synergy™ je **jednostavan** za primjenu




A



B

Postavljanje vrećice

1. Osigurajte da prozirno područje za lijepljenje, smješteno na podložnoj pločici, bude čisto i suho.
2. Postavite u istu ravan donji rub ljepljivog prstena vrećice s donjim rubom područja za lijepljenje. Primjenom načina **A** ili načina **B**, postavite vrećicu na podložnu pločicu.
3. Kada ste zalijepili donji dio, nastavite s lijepljenjem vrećice odozdo prema gore. Ovim postupkom postićete da stoma bude u središtu, a cijeli ljepljivi prsten vrećice zalijepljen na području za lijepljenje.
4. Zagladite prstom uokolo ljepljivog prstena vrećice i područja lijepljenja, kako bi bili sigurni da je spoj s podložnom pločicom gladak i bez nabora.

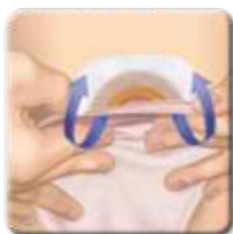

Jednostavna zamjena vrećice

1. Jednom rukom držite ušicu ljepljivog prstena vrećice, a drugom područje za lijepljenje podložne pločice.
2. Vrećicu odlijepite pokretom prema dolje.

Više nema krutih prstenova kojima se spajaju vrećica i podložna pločica, pa se zato pacijenti osjećaju mnogo udobnije s ESTEEM synergy™ sustavom .

Inovativna podložna pločica

jedinstvena ConvaTec Modelirajuća Tehnologija™



Kako djeluje

- Jedina podložna pločica s patentiranim modelirajućim ljepljivim slojem, za savršen spoj sa stomom.
- Jednostavno je! **Prstima se lagano oblikuje otvor po mjeri stome - škarice više nisu potrebne!**
- Fleksibilni hidrokoloidni obrub pločice pruža dodatnu razinu sigurnosti, povećava gibljivost i udobnost, te nježno prijanja uz osjetljivu kožu oko stome.

Spoj po mjeri

- Prilagodljiv, siguran i po idealnoj mjeri izveden spoj sa stomom, štiti kožu i onda kada se tijekom dana stoma širi ili sužava.
- Štoviše, ova tehnologija ne zahtijeva uporabu škarica, paste i/ili sličnih brtvila.

Široka paleta mogućnosti

Esteem Synergy™ **veliki izbor** proizvoda

Vrećice



zatvorena vrećica
s filterom

vrećica s ispustom

vrećica s ispustom
velika, prozirna



Stomahesive
podložna pločica



Stomahesive podl. pločica
s fleksibilnim obrubom



modelirajuća konveksna
podložna pločica

Podložne pločice

Esteem synergy® paleta proizvoda

Esteem synergy® vrećice

| naziv | promjer (mm) | kom/pak | kod za naruč. |
|------------------------------|--------------|---------|---------------|
| zatvorena vrećica s filterom | 35 | 30 | 405436 |
| (za kolostomu) | 48 | 30 | 405437 |
| | 61 | 30 | 403946 |
| vrećica s ispustom | 35 | 10 | 409200 |
| (za ileostomu) | 48 | 10 | 409201 |
| | 61 | 10 | 409202 |
| vrećica s ispustom velika | 89 | 10 | 405406 |

Esteem synergy® podložne pločice

| naziv | promjer (mm) | kom/pak | kod za naruč. |
|----------------------------------|--------------|---------|---------------|
| Stomahesive podl. pločica | 35 | 5 | 405484 |
| | 48 | 5 | 405485 |
| | 61 | 5 | 405486 |
| | 89 | 5 | 405487 |
| podl. pl. s fleksibilnim obrubom | 35 | 5 | 409265 |
| | 48 | 5 | 409266 |
| | 61 | 5 | 409267 |
| modelirajuća podl. pločica | 13/35 | 5 | 409271 |
| (za uvučenu stomu) | 22/48 | 5 | 409272 |
| | 33/61 | 5 | 409273 |

NAMIJENJENO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA



Frana Folnegovića 1c, 10000 Zagreb • TEL: 01/5508-999 • FAX: 01/6177-217
prodaja i savjetovanje: Ozaljska 148, 10110 Zagreb • TEL: 01/3015-949
Besplatni info tel: **0800-8000** • www.stoma-medical.hr

